

REMISS PROVTAGNING STOCKHOLM3

PATIENT

För- och efternamn: _____

Personnummer: _____

Email: _____

Mobilnummer: _____

1. Har patientens pappa eller någon av patientens eventuella bröder/söner fått diagnosen prostatacancer? _____
2. Har patienten nu eller under de senaste 3 månaderna kontinuerligt tagit dutasterid (t.ex. Avodart) eller finasterid (t.ex. Proscar, Finasterid m.fl)? _____
3. Har patienten tidigare genomgått en prostatabiopsi? _____

PROVTAGNINGSANVISNING

Innehåll i provtagningssetsen

- 1 provtagningsanvisning
- 1 provtagningsremiss med 2 provrörsetiketter
- 1 EST-rör 13*75 mm i plast för plasma
- 2 transporthylsor med skruvlock avsedda för rör 13*75 mm
- 1 transportkuvert

Provtagning och transport

Ta två av mottagningens egna EDTA-rör 13*75 mm i plast, lila propp (4 ml) avsedda för helblodsanalys och fyll med tillräckligt med blod (se nedan). Vänd båda rören direkt efter provtagning 5-10 gånger.

Märk det första EDTA-röret med etikett **HBEDTA ÅÅMMDDNNNN** och stoppa det i den tomma transporthylsan. Skruva på locket. Centrifugera det andra EDTA-röret (10 min, 2000G). Håll av plasma till EST-röret som ingår i provtagningssetsen. Märk EST-röret med etikett **PLEDTA ÅÅMMDDNNNN** och stoppa tillbaka EST-röret i transporthylsan. Skruva på locket.

Observera att rören var och ett måste innehålla mer än 1,5 ml provmaterial. Notera dina provtagningsuppgifter nedan och stoppa in den tillsammans med transporthylsorna i transportkuvertet och förslut. Posta transportkuvertet med ordinarie A-post.

Transportkuvertet ska förvaras kylt till det postas. Om transportkuvertet inte kan postas samma dag som proverna tas måste transportkuvertet frysas. Proverna får endast postas MÅN-ONS.

Vänligen fyll i uppgifter om provtagningen här!

Datum och tid: _____

Vårdenhet: Gendoktorn Medicinsk Service

Provtagare: _____